

תכשיר חיטוי אלכוהולי

מהיר פעולה בהתזה / ניגוב
מוכן לשימוש

ברישיון משרד הבריאות



deconex Solarsept

שימושים:

לשימוש על משטחים ועצמים קשי גישה להם נדרשת חשיפה וייבוש מהירים. מבוסס אלכוהול ומרכיבים אנטי מיקרוביאליים מהירי פעולה. למוצר ניחוח נעים ומרענן.

יעודים רפואיים:

משטחים, עזרים, מכשירים וציוד רפואי מחלקתי, כלים רפואיים, ציוד דנטלי, אמבטי טיפולים, ציוד ועזרי קוסמטיקה ופדיוקור.

פעילות אנטימיקרוביאלית וחשיפה:

ריכוז	ניקוי
30 שניות	Bactericidal, fungicidal (C.albicans)
30 שניות	Tuberculogical (M.Terra)
1 דקה	HBV/HIV (HBsAG-test) B מסוג
30 שניות	BVDV (Surrogate for HCV) C כבד
30 שניות	Rota Virus וירוס
2 דקות	PCV (surrogate for Noroviruses)

מרכיבים פעילים:

Propan-2-ol 439 mg/gr

Propan-1-ol 219 mg/gr

N-(aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamine 1.5 mg/g

תאימות חומרים:

אינו מתאים לזכוכית אקרילית Plexiglass

הוראות שימוש:

deconex Solarsept הינו תכשיר מוכן לשימוש. בשימוש רגיל יש להתיזו על משטחים או עצמים ממרחק של 20-30 ס"מ. אפשר להתיזו אל תוך מטלית ולנגב. הרטבה מלאה של האובייקטים המטופלים הינו תנאי מוקדם ליעילות אנטימיקרוביאלית מלאה. כמות חומר למ"ר 20-25 ml/m²

בטיחות דליק. התז בתנאי איורור טובים. במקרה מגע עם העיניים, שטוף בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. לא לבלוע. במקרה בליעה פנה למיון רפואי.
למידע נוסף נא עיין בעלון המוצר ובדף הבטיחות MSDS. דף בטיחות מקורי יישלח מייד לכל דורש, בדואר אלקטרוני.